

T.O. SPACER DE HANCHE

PRÉMOULÉ
AVEC ANTIBIOTIQUE
GENTAMICINE



SYNOPSIS DE POSE DU SPACER DE HANCHE



ÉTAPE 1 :

EXTRAIRE LA PROTHÈSE

Après l'extraction de la prothèse infectée, le canal médullaire fémoral et le cotyle doivent être soigneusement nettoyés.

ÉTAPE 2 :

MESURER LA TAILLE DE L'IMPLANT COTYLOÏDIEN

Grâce au pied à coulisse stérile, l'implant cotyloïdien est mesuré sur la partie extérieure afin de définir la taille du SPACER.

ÉTAPE 3 :

CIMENTER


Mettre en place le ciment antibiotique si besoin de stabiliser le SPACER sur la partie haute de la métaphyse et d'éviter la rotation.

ÉTAPE 4 :

METTRE LE SPACER EN PLACE ET RÉDUIRE

Le SPACER est introduit dans le fémur afin de relarguer l'antibiotique in situ pendant la durée du traitement. Dans la majorité des cas, le patient pourra déambuler avec un appui partiel.

NB : Dans le cadre d'une reprise avec fémorotomie, il est possible d'utiliser les SPACERS Type Charnley de RÉVISION (tiges longues 250 mm).

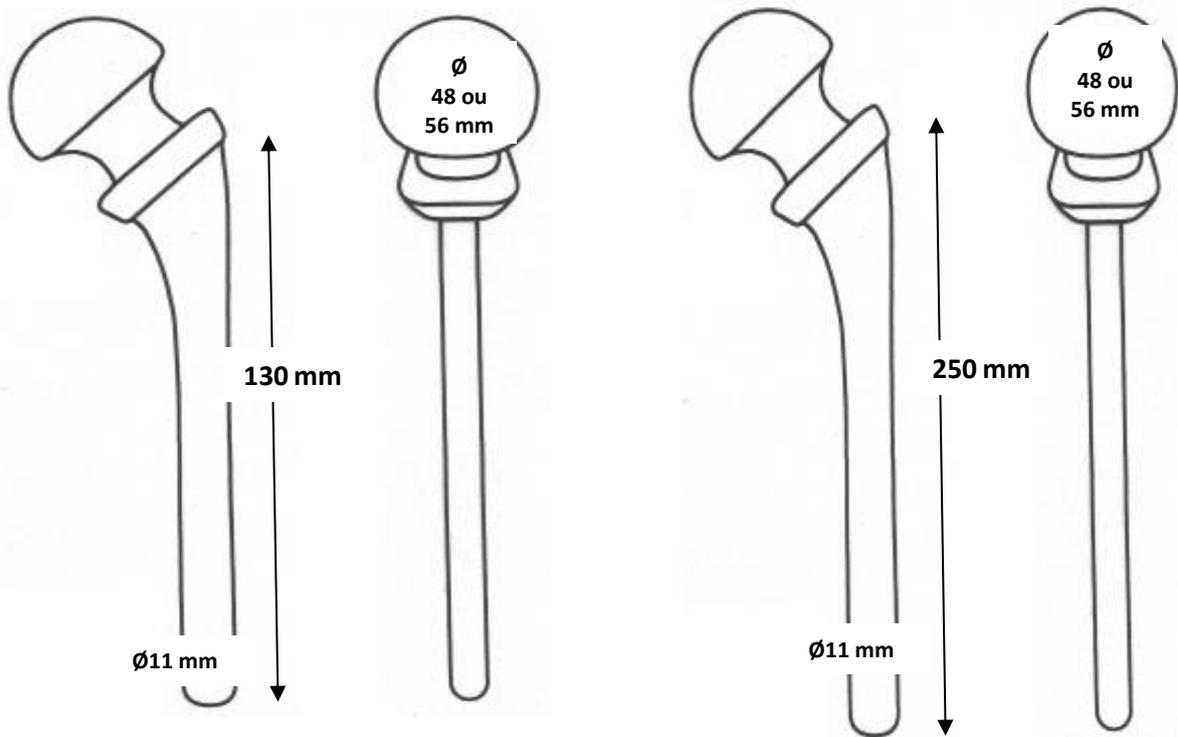

Ce synoptique de pose est proposé à titre indicatif pour assister le chirurgien lors de son intervention. Il devra bien sûr l'adapter en fonction de l'indication et du patient. Le spacer n'est pas une prothèse, il a pour seule vocation de conserver l'espace intra-articulaire temporaire pendant toute la durée du traitement



Distributeur exclusif France :

PROTHYS
O R T H O P É D I E

www.prothys.com

Service clients du lundi au vendredi de 9h à 17h

12, rue Bernard de Ventadour - 19100 Brive-la-Gaillarde

Tél : 05 55 17 17 92 - Fax : 05 55 17 17 98 - Mail : contact@prothys.com