


SPACER ÉPAULE



TEMPS PRINCIPAUX DU SPACER ÉPAULE

PRÉMOULÉ
AVEC ANTIBIOTIQUE
GENTAMICINE

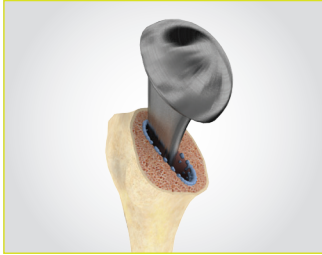


ÉTAPE 1 : EXTRACTION DE LA PROTHÈSE

Après l'extraction de la prothèse infectée, l'humérus est soigneusement nettoyé avec **un laveur haute pression**.




ÉTAPE 2 : MESURE DE LA TAILLE DE L'IMPLANT

Grâce au pied à coulisse stérile, la tête humérale de l'implant est mesurée pour définir la taille du SPACER.

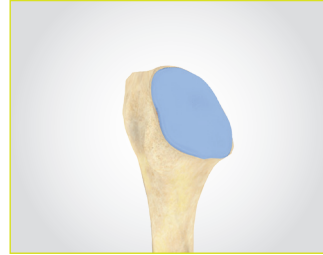

ÉTAPE 3 : CIMENTATION

Mettre en place le ciment antibiotique si besoin de stabiliser le SPACER sur la partie haute de la métaphyse et d'éviter la rotation.

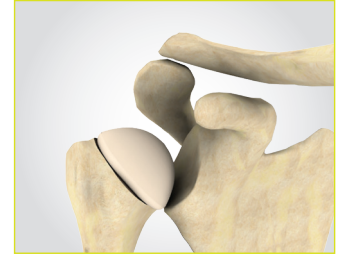

ÉTAPE 4 : MISE EN PLACE ET RÉDUCTION DU SPACER

Le SPACER est introduit dans l'humérus afin de relarguer l'antibiotique in situ pendant la durée du traitement. Dans la majorité des cas, le patient pourra conserver une autonomie fonctionnelle provisoire.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Diamètres des têtes (mm)		Long. de tige (mm)
40	48	120

> Ce SPACER n'étant pas une prothèse, il a pour vocation unique de conserver l'espace intra-articulaire temporairement.

Synoptique de pose proposé à titre indicatif pour assister le chirurgien. Il devra bien sûr l'adapter en fonction de l'indication et du patient.



RECOMMANDATION

Il est fortement conseillé d'utiliser un laveur haute pression pour nettoyer l'os avant la mise en place d'un SPACER intra-articulaire temporaire.

Distributeur exclusif France :

PROTHYS
ORTHOPÉDIE

www.prothys.com

Service clients du lundi au vendredi de 9h à 17h

12, rue Bernard de Ventadour - 19100 Brive-la-Gaillarde

Tél : 05 55 17 17 92 - Fax : 05 55 17 17 98 - Mail : contact@prothys.com